

國立中興大學獸醫學院動物疾病診斷中心

病理檢驗送檢須知

1. 送病例前，請最好於上班時間內先行以電話聯繫本中心之收檢人員（病理獸醫師），以利安排進行病理與微生物檢驗。每上班日最遲掛號時間為下午 4:00。
2. 病材處理
 1. 採樣後盡快以 10% 中性福馬林固定，勿冷藏或冷凍。
 2. 組織與福馬林溶液體積比約 1：10。
 3. 若組織過厚，可稍加切割（勿切斷），以增加福馬林固定效果，盡量保留原始面貌及大小。
 4. 片狀或長條型組織，固定前建議先置於紙板上再置入固定液中，可避免組織固定後捲曲。
 5. 可使用染色劑或縫線做標記，以利判讀相對位置或組織邊緣。
 6. 如果無 10% 中性福馬林，可使用絕對酒精替代，固定時間勿超過 12 小時尤佳。
 7. 郵寄或配送時，請用較堅固的有蓋容器（罐子或盒子）盛裝含組織之袋子。最後再用紙箱包裝有蓋容器（包裝由外而內為：紙箱 罐子 袋子 組織片）。
 8. 詳細填妥病歷資料（請填具診斷中心掛號資料：包括送檢者聯絡資料，病畜基本資料，基本病史，用藥與臨床症狀。犬、貓動物另請加填「外科病理病歷單」）。
3. 動物屍體解剖
 1. 動物死亡後，宜盡速送檢，並以冷藏方式保存，切勿以冷凍方式保存。
 2. 報告僅作為釐清病情，不做任何公證憑據（委託剖檢並請填具「動物屍體剖檢同意書」）。
 3. 本中心所獲得之資訊來源均為送檢者所提供之資料，在未得送檢者同意，不會私自與第三方聯絡，非相關人士請勿來電詢問相關結果。
4. 報告完成所需天數
 1. 外科組織判讀（已固定）：至少 3 個工作天。
 2. 外科組織判讀（未固定）：至少 5 個工作天。
 3. 經濟動物屍體解剖：7-10 個工作天。
 4. 細菌及藥物敏感性試驗：5-10 個工作天。
 5. 分子生物學檢測：5-10 個工作天。
5. 冷藏快遞寄送病例

1. 若需進行病理檢驗、PCR 等分生診斷與細菌分離，請務必將病材冷藏（4°C）交寄。
 2. 若為血清（不是血液）檢體，請務必先冷凍(-20°C)後再交寄。
 3. 若為未將血清分離之採血針筒，則以冷藏交寄。
6. 郵政掛號：檢體可利用快捷或宅急便，
郵寄至「40227 台中市興大路 145 號 國立中興大學 獸醫學院
動物疾病診斷中心 收」。
7. 收費標準參考「國立中興大學動物疾病診斷中心收費標準」。
8. 聯絡電話：

診斷中心掛號室： 04-22840895 轉 112 楊珊盈小姐
04-22840895 轉 122 許靜宜小姐

病理獸醫師：04-22840895 轉 255 病理獸醫師